

IT'S TIME FOR ENDO SURGERY EVOLUTION*

*Es tiempo para la evolución
de la cirugía endo.

ENDOSURGERY



ACTEON

ACÉRQUESE A LA MICROCIRUGÍA ENDODÓNCICA APICAL CON INSTRUMENTOS ESPECIALMENTE DESARROLLADOS PARA ESTE PROCEDIMIENTO

En la era de las soluciones mínimamente invasivas, el desafío del tratamiento dental es salvar el diente antes de considerar su extracción.

La instrumentación manual juega un papel importante en el procedimiento de microcirugía endodóncica y debe adaptarse a las limitaciones anatómicas del sitio quirúrgico para aumentar las posibilidades de un tratamiento exitoso del canal retrógrado.

El kit Endosurgery cumple estos requisitos gracias a sus instrumentos adaptados y microespejos que proporcionan un reflejo claro y fiel de la imagen para beneficiarse de la mejor cadena óptica al microscopio.



Radiografía preoperatoria.



Radiografía postoperatoria.



MINIMALLY INVASIVE SOLUTIONS*

*Soluciones mínimamente invasivas.

Conservar el diente gracias a
un **tratamiento de
microcirugía endodóncica.**

Instrumentos desarrollados
para **una microcirugía
endodóncica** mínimamente
invasiva.

100%

DISEÑADO PARA
MICROCIRUGÍA
APICAL

SALVAR

EL DIENTE O
LA RECONSTRUCCIÓN
PROTÉSICA

DESARROLLADO CON

2

ENDODONCISTAS
EXCLUSIVOS

CADENA
ÓPTICA

ÓPTIMA
PUREREFLECT

INSTRUMENTOS MÍNIMAMENTE INVA

ENDOSURGERY
ESSENTIAL

ELIJA LO ESENCIAL

Para los profesionales que ya están equipados con un kit de cirugía estándar, hemos agrupado en un kit los **11 nuevos instrumentos esenciales para la microcirugía endodóncica apical**. El profesional podrá personalizar su bandeja combinando el kit Endosurgery Essential con sus instrumentos quirúrgicos.




Instrumentos finos con angulaciones adecuadas que permiten trabajar en pequeñas cavidades.

LOCALIZAR



Localización y evaluación de periodontitis.

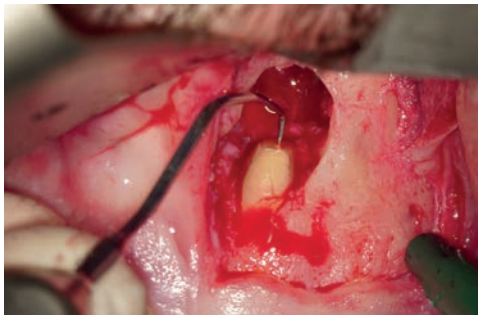

Los ángulos de la sonda n° 17 están perfectamente indicados para apuntar el orificio del conducto y facilitar su preparación.

Sonda doble: sonda periodontal 3 / 6 / 9 / 11 mm + sonda n° 17.

AHORRO DE
ESPACIO EN
LA BANDEJA

2 instrumentos en 1

SIVOS



INCISIÓN



El mango redondeado con una cómoda zona de agarre permite un manejo preciso durante la incisión.

MANGOS
ERGONÓMICOS XL
= PRECISIÓN
EN CIRUGÍA

Minibisturí, mango XL.

SEPARAR Y ELEVAR




Los bordes ligeramente afilados de la figura en forma de cuchara y su superficie curvada ayudan a preservar el colgajo durante el desprendimiento y la elevación del periostio.



La forma de lanza está indicada para desprender y elevar la papila.

Retractor
de colgajo.

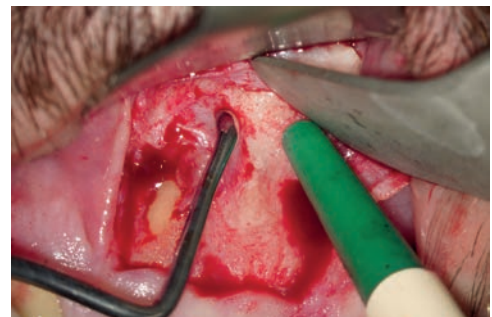


Separar y raspar los tejidos inflamatorios y el granuloma gracias a la forma de cuchara. Los bordes están ligeramente afilados para una mayor eficiencia.

Cureta ósea Lucas.



PRECISIÓN PARA UNA PREPARACIÓN

RASPAR

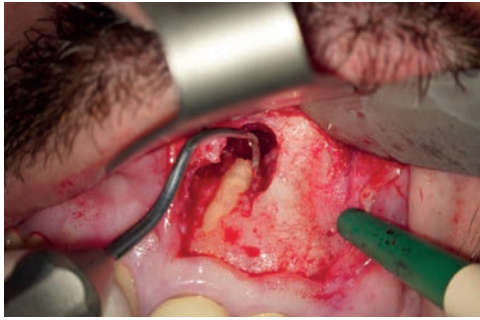


Las curetas endo para granuloma tienen una excelente adaptación anatómica para el raspado de la lesión alrededor de la raíz gracias a:

- Su angulación.
- Su afilado doble.


La forma interna está curvada para incrustar más fácilmente los tejidos inflamatorios o el granuloma.

Curetas para huesos y tejidos inflamatorios.

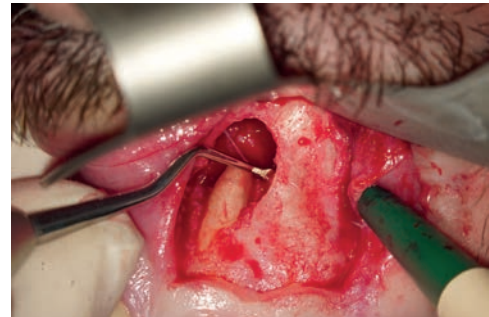

Finalización del raspado del tejido infectado.

OBTURAR

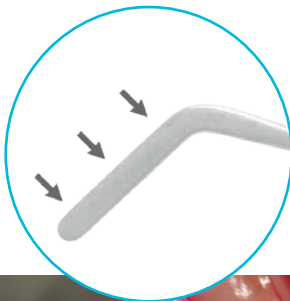

El borde está ligeramente afilado para permitir que el material de obturación se corte sin aplastarlo.

Es importante preservar su forma cónica para facilitar su inserción en el conducto.



Espátula para coger e insertar el material de obturación.

Miniexcavador. 1 mm.


PARTES
ACTIVAS
ADAPTADAS Y
REFINADAS.

ÓPTIMA DEL CONDUCTO

Condensadores de obturación.

Dependiendo de la profundidad del conducto, se necesitan varios tamaños de condensadores para garantizar una obturación completa.

4 mm.

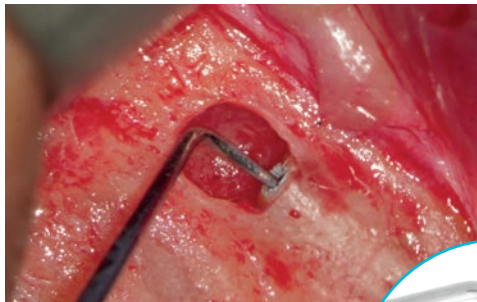

La forma cónica de nuestros condensadores permite seguir exactamente la huella dejada por los insertos ultrasónicos. Por lo tanto, ofrecen una mejor integración del material de obturación en el conducto.

La punta adaptada de la extremidad asegura una inserción del material sin dañar la pared del conducto.




Cond.
doble.

ÓPTIMA
CONDENSACIÓN
DEL MATERIAL DE
OBTURACIÓN.

6 mm.

Condensador
3 mm.

Instrumento
doble.

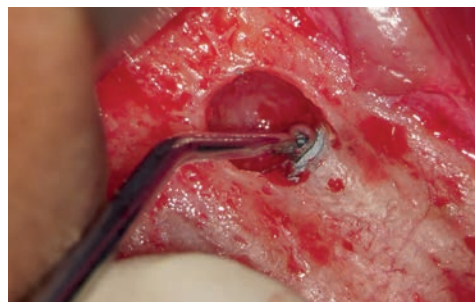

El bruñidor permite finalizar la obturación y eliminar el exceso de material de manera limpia al nivel de la parte reseca.

Bruñidor

LA HERRAMIENTA IDEAL CON MICR

EXCLUSIVO
ACTEON

NUEVO

AHORRO
DE TIEMPO

AHORRO DE
ESPACIO EN
LA BANDEJA

Mango de doble espejo.

Microespejo $\varnothing$ 3 mm.

Microespejo rectangular 7x2 mm.



► Para ver la zona resecada, el uso de microespejos es esencial.

► El mango de doble espejo permite beneficiarse de dos formas en el mismo instrumento y cambiar de una forma a otra.

OSCOPIO




PURERELECT

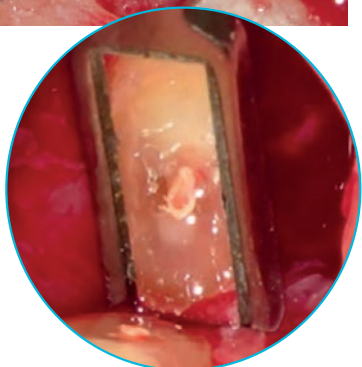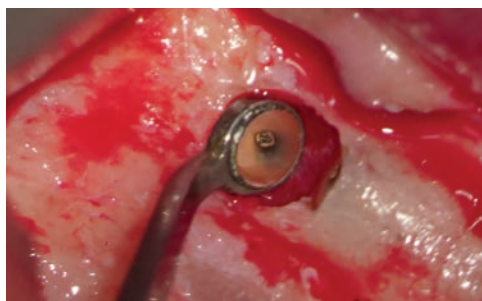

► Microespejos con tecnología Pure Reflect®.

Tasa de reflejo (%)

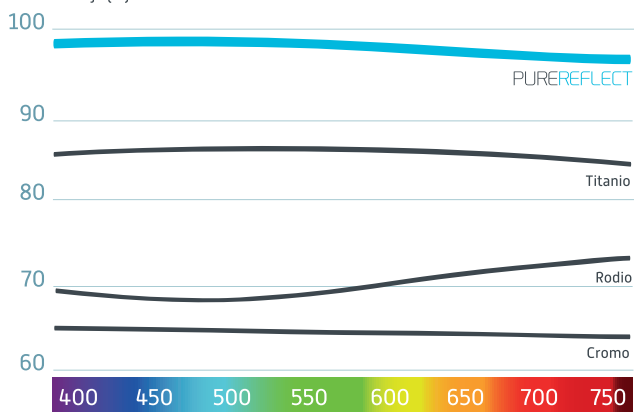

Longitudes de onda visibles (nm)
Fuente: laboratorio CNRS - Francia 12/2013

► Visión clara de los detalles, colores y estructuras dentales.

► Dependiendo del posicionamiento en la cavidad, se prefiere la forma redonda o rectangular.

EL ARTE DE LA CIRUGÍA ENDODÓNICA

ENDOSURGERY

— INTEGRAL

OPTE POR UN KIT COMPLETO DE ACUERDO A SU NIVEL DE EQUIPAMIENTO

El kit Endosurgery Integral incluye los instrumentos del kit Endosurgery Essential e incluye también los instrumentos quirúrgicos estándares que recomendamos para seguir el protocolo de cuidados. Los kits Endosurgery Essential e Integral se suministran con nuestras nuevas bandejas de esterilización con un sistema de cierre tipo “mariposa” muy simple. Gracias a su diseño de calado, son ideales para una limpieza con una lavadora de calor.



Mango XL
para cuchillas.



Mango XL para espejos + espejo Pure Reflect n°4.



Kit completo listo para ser
utilizado según el protocolo
de cirugía endodóncica

SUTURAR



Pinza Perry.

Las mandíbulas curvadas y estriadas permiten manipular y respetar el colgajo y el hilo de sutura.



Tijeras Lagrange de Carburo de Tungsteno.



Portaagujas curvado de Carburo de Tungsteno.

CA APICAL AL ALCANCE DE TODOS



NUEVO



3 cuchillas para adaptarse a todas las situaciones clínicas y limitaciones anatómicas.



Mango ergonómico. Gracias a su gran diámetro, el agarre por parte del profesional o el asistente es efectivo y limita la fatiga manual, especialmente durante cirugías largas.

Retractor para separar tejidos blandos.



Video por capítulos disponible para verificar el uso de cada instrumento

KOL

Instrumentos desarrollados con los doctores Jean-Philippe Mallet y Romain Orлу, cirujanos dentales, práctica limitada a la Endodoncia, París.

Fotos: cortesía del Dr. Jean-Philippe Mallet, cirujano dental, práctica limitada a la Endodoncia, París.

Ref.	Descripción
230XL	KIT ESSENTIAL

233.20	Bandeja de cirugía 285x92x37 mm + 2 clips.
610.01XL	Minibisturí.
407.16XL	Retractor de colgajo.
263.18XL	Sonda doble perio + nº17.
135.87XL	Cureta ósea Lucas.
412.07XL	Cureta para huesos y tejidos nº1.
412.13XL	Cureta para huesos y tejidos nº2.
MP3303PH	Microespejo Pure Reflect® Ø 3 mm.
MP3306RPH	Microespejo rectangular Pure Reflect® 7x2 mm.
210.02XL	Mango XL doble para microespejos.
193.10XL	Espátula para material de obturación.
230.01XL	Condensador doble.
230.00XL	Instrumento doble Condensador / bruñidor.
164.19XL	Miniexcavador.

ENDOSURGERY
ESSENTIAL

Ref.	Descripción
231XL	KIT INTEGRAL

233.20	Bandeja de cirugía 285x92x37 mm + 2 clips.
610.01XL	Minibisturí.
407.16XL	Retractor de mejilla.
263.18XL	Sonda doble perio + nº17.
135.87XL	Cureta ósea Lucas.
412.07XL	Cureta para huesos y tejidos nº1.
412.13XL	Cureta para huesos y tejidos nº2.
MP3303PH	Microespejo Pure Reflect® Ø 3 mm.
MP3306RPH	Microespejo rectangular Pure Reflect® 7x2 mm.
210.02XL	Mango XL doble para microespejos.
193.10XL	Espátula para material de obturación.
230.01XL	Condensador doble.
230.00XL	Instrumento doble Condensador / bruñidor.
164.19XL	Miniexcavador.
610.00XL	Bisturí.
210.36XL	Mango XL + espejo Pure Reflect® nº4.
747.02TC	Portaagujas Castroviejo curvado TC.
636.00TC	Tijeras Lagrange curvadas TC.
151.K	Kit retractor + 3 cuchillas.
222.02	Pinza Perry.

ENDOSURGERY
INTEGRAL

Productos sanitarios de clase I con marcaje CE, según la directiva europea vigente. Lea las instrucciones en el manual de uso o en el etiquetado cuidadosamente. No reembolsados por las organizaciones de seguros de salud. Productos destinados exclusivamente a profesionales dentales. Productos diseñados y fabricados de acuerdo con un sistema de garantía de calidad certificado según EN ISO 13485. Fabricante: PRODONT-HOLLIGER Grupo ACTEON (Francia).